

# Optimalisatie van wondgenezing



**Ad**  **ancis**  
Medical

# Introductie

In onze gezondheidseconomie is het duidelijk dat de vraag naar gezondheidszorg toeneemt. Dit is te wijten aan factoren zoals een vergrijzende bevolking, de prevalentie van chronische aandoeningen zoals bijvoorbeeld diabetes en de hogere levensverwachting van de patiënt.



Optimalisatie van wondgenezing biedt voordelen aan zorgverzekeraars, zorgprofessionals en patiënten:

## Zorgverzekeraar

- ✓ Verminderen verspilling
- ✓ Verbeteren van de doelmatigheid en efficiëntie van het medische hulpmiddel
- ✓ Beheersen van de toenemende vraag naar wondzorg



## Zorgprofessional

- ✓ Meer tijd voor de patiënt
- ✓ Helpt bij het beheersen van toenemende werklust
- ✓ Welzijn van het personeel verbeteren
- ✓ Hogere arbeidssatisfactie door betere behandelresultaten
- ✓ Snellere wondgenezing door verminderen van complicaties



## Patiënt

- ✓ Meer behandeltime bij afspraken
- ✓ Verbeterde resultaten van wondzorg
- ✓ Continuïteit van zorg
- ✓ Verhoging van het welzijn van de patiënt
- ✓ Vermindering van stress en trauma bij verbandwissels



# Advancis Medical en optimalisatie van wondgenezing



Advancis Medical is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, waar we al onze oplossingen voor wondgenezing onderzoeken, ontwikkelen en produceren. We hebben een internationale reputatie opgebouwd als een deskundige fabrikant van geavanceerde verbandmaterialen welke écht een verschil maken voor het leven van patiënten en zorgprofessionals.

## Onze missie

Wij ontwerpen, ontwikkelen en bieden klinische voordelen, door het gebruik van unieke en innovatieve producten. Daarnaast bieden wij een economisch voordeel voor de zorgprofessionals.

## Hoe wij werken

Of we nu werken met artsen, verpleegkundigen, verzorgers of leden van ons eigen team, we stellen altijd de behoeften van de patiënt voorop. Het is onze toewijding aan mensen, die onze principes bepalen:

- Patiëntresultaten verbeteren
- Hersteltijd verkorten
- Maximaal comfort voor de patiënt
- Continue productontwikkeling
- Commitment aan onderwijs
- Bieden van kosteneffectieve oplossingen

## Onze producten

Advancis Medical introduceerde in 2004 als eerste medicinale Manuka honing, als medisch hulpmiddel, in het Verenigd Koninkrijk. Sindsdien hebben we samengewerkt met toonaangevende experts op het gebied van wondgenezing, artsen, patiënten en verzorgers, om oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen binnen wondzorg.

# Activon

Manuka honing



De eigenschappen van Activon® Manuka honing verbanden bieden voordelen die niet worden aangetroffen in andere soorten verbanden. Naast zijn antimicrobiële, debriderende en geur reducerende eigenschappen, beschermt Activon®

Manuka honing het wondbed en zorgt het voor een vochtig wondmilieu, waarvan bekend is dat het snellere wondgenezing bevordert.

Activon® Manuka honing is positief geëvalueerd bij meer dan 390 patiënten, waaronder kinderen, pasgeborenen en mensen met een gevoelige of broze huid. Het bewijsmateriaal bestrijkt een breed scala aan wonden, waaronder brandwonden, langdurige acute wonden, been ulcera, decubituswonden, diabetische voet ulcera en schimmelwonden.

## Natuurlijk antimicrobieel zonder bekende bacteriële resistentie

Activon® Manuka honing is gemaakt van nectar verzameld van Leptospermum-planten (onderdeel van de teatree familie) door bijen in Nieuw-Zeeland. Activon® Manuka honing heeft antimicrobiële eigenschappen die niet in andere honingsoorten te vinden zijn (zie kader 1).

Activon® Manuka honing is een breedspectrum antimicrobieel middel tegen de meeste bacteriën die de wond binnendringen, waaronder Staphylococcus Aureus en Pseudomonas Aeruginosa, en de antibiotica-resistente MRSA en VRE. Er is ook aangetoond dat het biofilm vorming door MSSA, MRSA en VRE.5 voorkomt.

**Het gebruik van Activon® Manuka honing kan de behoefte aan systemische antibiotica verminderen.<sup>6</sup>**



## Kader 1: unieke antimicrobiële werkwijze van manuka honing

- 1. Methyl glyoxal en niet-neutraliseerbare waterstofperoxide activiteit (NPA)** – Methyl glyoxal is een chemische verbinding die 100 maal meer voorkomt in Manuka honing dan in andere honingsoorten. Het is een belangrijke bacteriedodende component van Manuka honing<sup>8</sup>. Het niveau van methyl glyoxal correleert met het niveau van antimicrobiële activiteit en wordt gemeten als NPA. Bij een NPA-niveau van 10 of hoger wordt de honing geschikt geacht voor medisch gebruik. Activon® Manuka honing heeft gegarandeerd een minimale NPA-waarde van 10 maar meestal hoger.
- 2. Zuurgraad** – De hoge zuurgraad / lage pH van Activon® Manuka honing maakt de omgeving ongeschikt voor groei van microben, aangezien de meeste bacteriën een voorkeur hebben voor een neutrale pH.
- 3. Osmose** - Activon® Manuka honing onttrekt water uit de bacteriële cellen via osmose, waardoor ze uitdrogen en zich niet meer kunnen vermenigvuldigen.
- 4. Hoog suiker, laag watergehalte** – Activon® Manuka honing bevat een hele hoge concentratie van suikers en een laag watergehalte. De suikers binden zich gemakkelijk aan watermoleculen zodat deze niet beschikbaar zijn om de groei en deling van micro-organismen te voeden.<sup>9</sup>
- 5. Waterstofperoxide** – Bij verdunning met exsudaat produceert Activon® Manuka honing lage niveaus van waterstofperoxide. Hoewel dit niveau niet hoog genoeg is om schadelijke effecten voor de patiënt te veroorzaken, is het nog steeds een zeer effectief antimicrobiële middel.<sup>10</sup>

Al deze werkingsmechanismen geven  
Activon® Manuka honing zijn  
breedspectrum antimicrobiële activiteit

# Veilig en effectief debrideren en wondbeslag verwijderen

Necrotisch weefsel en wondbeslag kunnen bacteriën bevatten die wondgenezing belemmeren.

Activon<sup>®</sup> Manuka honing:

- Bevordert autolytisch debridement door, via osmose, water uit huidcellen te halen wat hydrateert, verzacht en de harde korst en beslag vloeibaar maakt.
- Creëert, door zijn lage pH, een optimale omgeving voor een verminderde aanmaak van wondbeslag.<sup>11</sup>

## Veilig:

Activon<sup>®</sup> Manuka honing helpt de wond te debrideren en het wondbeslag te verwijderen zonder de risico's die verbonden zijn aan andere debriderings-technieken. Het is volkomen veilig omdat het selectief is en alleen het necrotische weefsel of wondbeslag beïnvloed.

Activon<sup>®</sup> Manuka honing kan, vanwege de antimicrobiële eigenschappen, ook worden gebruikt op geïnfecteerde wonden, waar andere methoden van autolytisch debridement gecontra-indiceerd zijn.



Voor gebruik van Activon<sup>®</sup> Manuka honing



Na gebruik van Activon<sup>®</sup> Manuka honing

## Effectief:

Het is belangrijk om necrotisch weefsel en beslag zo snel mogelijk te verwijderen om het genezingsproces van de wond niet te vertragen. In een evaluatie van 20 patiënten is Activon<sup>®</sup> Manuka honing de enige honing die 100% debridement weet te realiseren op dag 15 bij 3 van de 5 patiënten.

Gemiddeld debridement per dag wordt getoond in Figuur 1.


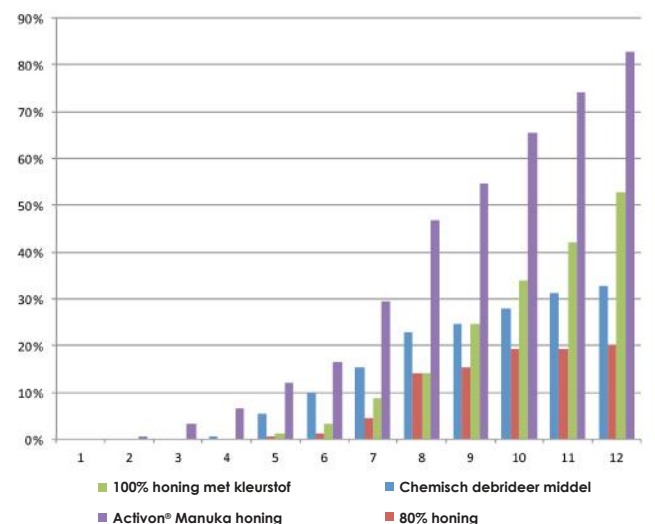


Fig. 1 Gemiddeld debridement per dag in wonden behandeld met honing en een chemisch debriderend middel<sup>13</sup>






# Geur reducerende werking

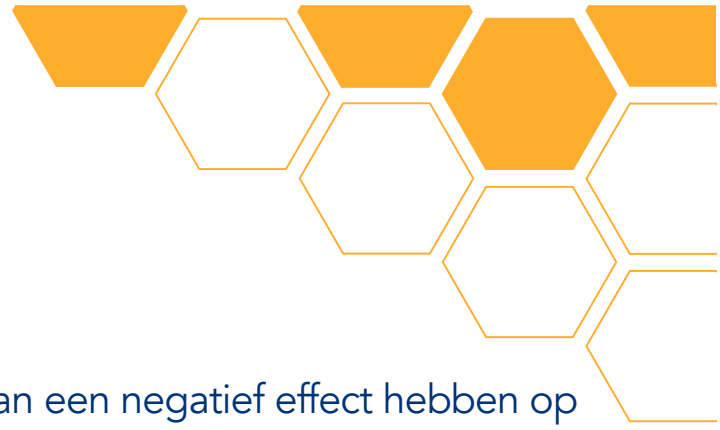

Slechte geur, geassocieerd met wonden, kan een negatief effect hebben op kwaliteit van leven. Sommige patiënten geven aan dat het hen hindert in de omgang met anderen en dat familieleden het bezoeken vermijden, wat kan leiden tot sociaal isolement.

Vluchtige geuren worden gegenereerd tijdens het anaerobe metabolisme van bacteriën. Sommige veel voorkomende wondpathogenen, hebben verschillende geuren. *Pseudomonas Aeruginosa* produceert bijvoorbeeld een visgeur en *Staphylococcus Aureus* een kaas geur.<sup>14</sup>

De suikers in Activon® Manuka honing veranderen de manier waarop de bacteriën metaboliseren, wat resulteert in minder geurende bijproducten.

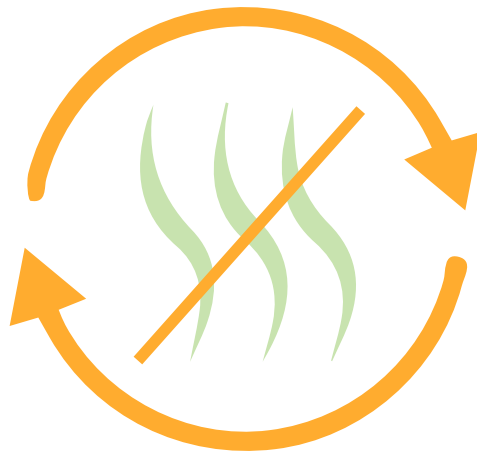

Activon® Manuka honing elimineert de oorzaak van de geur, in plaats van deze te maskeren

# Activon

## Manuka honing

# assortiment

Advancis Medical brengt de voordelen van 100% Manuka honing in een veelzijdig assortiment wondzorgproducten, zodat u het juiste verbandmateriaal voor uw patiënt kunt kiezen.



## Activon

### Tube

met Activon® Manuka honing



#### Beschrijving

Activon® Tube bevat 100% Manuka honing.

#### Indicaties

Activon® Tube kan op elk soort wond worden aangebracht en is vooral geschikt voor gebruik in holtes en ondermijningen. Het kan ook worden gebruikt om andere verbanden in het Activon® Manuka Honing assortiment aan te vullen wanneer de honing door exsudaat is weggespoeld.

#### Gebruik

Draai de dop eraf en breng de honing direct aan op de wond, of op het verband als u het aanvult.

Fixeer met een geschikt secundair verband.

Patiëntgebonden gebruik.

Kan tot 90 dagen na opening worden gebruikt.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



## Activon

### Tulle

met Activon® Manuka honing



#### Beschrijving

Activon® Tulle is een geweven viscose gaas geïmpregneerd met 100% Manuka honing.

#### Indicaties

Activon® Tulle is ideaal voor ondiepe wonden.

#### Gebruik

Verwijderen uit de verpakking en plaats op het wondoppervlak. Kan geknipt worden met een scherpe schaar of opgevouwen om grotere wonden te bedekken.

Het openvouwen vermindert de concentratie van honing op het wondoppervlak.

Fixeer met een geschikt secundair verband.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



#### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
25g	15350983	CR3830	12

#### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
5x5cm	15351009	CR3761	5
10x10cm	15351017	CR3658	5



# Algivon

met Activon® Manuka honing



## Beschrijving

Algivon® is een zacht algiinaat verband geïmpregneerd met 100% Manuka honing. De algiinaat vezels zorgen voor een langzamere afgifte van honing dan de geweven viscoze gaasverbanden.

## Indicaties

Algivon® is geschikt voor wonden met matig tot veel exsudaat zoals wonden met wondbeslag of geïnfecteerde natte wonden.

## Gebruik

Verwijder uit de verpakking en plaats op het wondoppervlak. Kan geknipt worden met een scherpe schaar of opgevouwen om grotere wonden te bedekken. Het openvouwen vermindert de concentratie van honing op het wondoppervlak. Fixeer met een geschikt secundair verband. Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



## Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
5x5cm	15351041	CR3831	5
10x10cm	15351068	CR3659	5

# Algivon Plus

met Activon® Manuka honing



## Beschrijving

Algivon® Plus is een versterkt, zacht algiinaat verband geïmpregneerd met 100% Manuka honing. Het versterkte algiinaat zorgt ervoor dat het verband intact blijft bij verwijdering uit de wond. De algiinaat vezels zorgen voor een langzamere afgifte van honing dan de geweven viscoze gaasverbanden. Het is verkrijgbaar als een vierkant of in een lintvorm met applicator.


## Indicaties

Algivon® Plus is geschikt voor wonden met matig tot veel exsudaat zoals wonden met wondbeslag of geïnfecteerde, natte wonden. Algivon® Plus Ribbon is geschikt voor holtes en ondermijningen.

## Gebruik

Verwijderen uit de verpakking en op het wondoppervlak plaatsen. Kan geknipt worden met een scherpe schaar of opgevouwen om grotere wonden te bedekken. Het openvouwen vermindert de concentratie van honing op het wondoppervlak. Fixeer met een geschikt secundair verband. Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

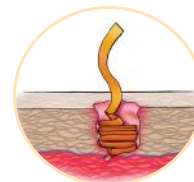

## Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
5x5cm	15959716	CR4230	5
10x10cm	15959724	CR4225	5
2.5x20cm	15959732	CR4231	5

# Actilite

met Activon® Manuka honing



## Beschrijving

Actilite® is een viscose netverband, gecoat met 100% Manuka-honing en Manuka olie\*.

## Indicaties

Actilite® is geschikt voor oppervlakkige wonden met weinig exsudaat om infecties te bestrijden of de bacteriële last te verminderen.

\* verhouding van 99% honing tot 1% olie

## Gebruik

Verwijder uit de verpakking, inclusief de transparante filmlaag en plaats deze op het wondoppervlak. Fixeer met een geschikt secundair verband.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



## Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
5x5cm	16222199	CR4281	10
10x10cm	15352161	CR3849	10
10x20cm	15352188	CR3852	10
20x30cm	16222202	CR4366	10
30x30cm	16222237	CR4367	5
30x60cm	16222334	CR4368	5

## Activon Manuka honing verband selectie overzicht

Het gebruik van het juiste Activon® Manuka honing verband optimaliseert de resultaten. Gebruik altijd een geschikt secundair verband om het exsudaat van de wond op te vangen. Bijvoorbeeld Advazorb® schuim voor weinig tot matig exsudaat of Eclipse® super absorberende verbanden voor matig tot veel exsudaat.

natuurlijk antimicrobieel zonder bekende bacteriële resistentie		veilig en effectief debridement	
geur reducerende werking			
nat	droog	necrotisch*	wondbeslag
Algivon® Plus Algivon®	Actilite®	Activon® Tulle Activon® Tube	Algivon® Plus Algivon® Activon® Tube

\* Als de wond droog en ischemisch is, vraag dan advies voordat u re-hydrateert.


# Silfix-technologie




**Verbandmaterialen met de zachte siliconen Silfix® technologie veroorzaken geen extra pijn of trauma voor de patiënt.**

Traditionele verbanden kunnen nieuw gevormd weefsel en de omliggende huid beschadigen, waardoor de genezing wordt vertraagd en pijn bij de patiënt wordt veroorzaakt.


## traditionele verbanden

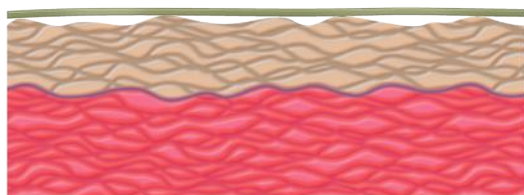

Traditionele verbanden zijn van nature inflexibel. Ze raken alleen de hoogste punten van het huidoppervlak, waardoor ze zich sterker aan een kleiner oppervlak hechten.

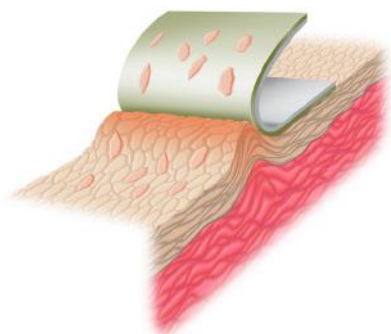


Traditionele verbanden beschadigen of verwijderen gemakkelijk cellen wanneer ze worden verwijderd en zijn bijna onmogelijk te herpositioneren zodra ze zijn aangebracht.

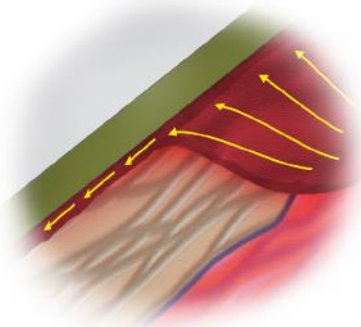


Traditionele verbanden vormen geen afdichting rond de wond, waardoor exsudaat kan lekken naar de omliggende huid.


## silfix zachte siliconenverbanden

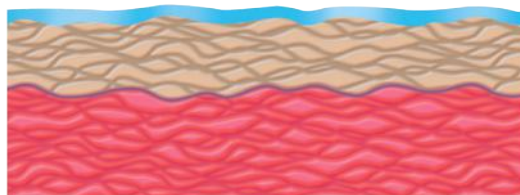

Silfix®-verbanden vormen zich naar het huidoppervlak en creëren een zachte hechting over het hele oppervlak.

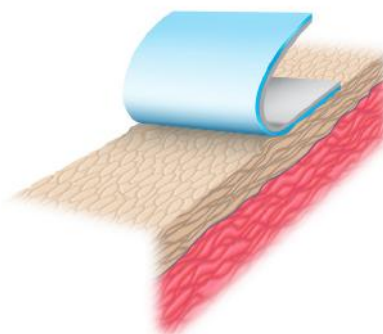

Silfix®-verband hecht zacht aan de droge huid; niet aan de vochtige wond. Dit voorkomt het meetrekken van de huid en schade aan gezond weefsel bij de verbandwissel, waardoor pijn en ongemak voor de patiënt worden geminimaliseerd.

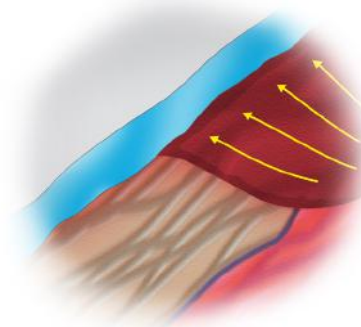

Silfix®-verbanden verzegelen de wondranden om maceratie te voorkomen.

**De Silfix®-technologie is te vinden in het Eclypse®, Advazorb® en Silflex® assortiment.**

# Eclipse®

Super absorberende verbanden



Het effectief verwerken van exsudaat is van groot belang in wondzorg. Het kan de genezingsstijd verkorten, kosten reduceren en de impact op de patiënt verminderen, zowel fysiek als mentaal (WUWHS, 2007).<sup>15</sup>

A close-up photograph of a clear, faceted diamond crystal, showing its intricate facets and light reflections. The image is used as a background for the text in the middle section.

Eclipse® is een productlijn super absorberende verbanden met CrystaLock technologie, die de eigenschap heeft om veel exsudaat te kunnen absorberen en deze op te sluiten in de kern van het verband, waardoor lekken vermindert en het risico op maceratie verkleint.

## Dynamische vochtopname behoudt van vochtig wondmilieu

In tegenstelling tot sommige inferieure absorberende verbanden die agressief alle aanwezige exsudaat 'opzuigen', verwijdert Eclipse® geleidelijk overmatig exsudaat uit wond zodat een optimaal vochtig wondmilieu wordt bereikt en behouden blijft.

Schadelijke cellen in exsudaat zoals infectie-veroorzakende bacteriën en Matrix Metallo Proteasen (MMP's) die wondgenezing kunnen vertragen, worden ook verwijderd met het exsudaat, waardoor een optimale omgeving voor wondgenezing wordt gecreëerd.<sup>16</sup>




# Geen lekkage van exsudaat zodat de kwaliteit van leven van de patiënt verbeterd

Regelmatige verbandwissels en lekkage van exsudaat kunnen belastend zijn voor patiënten, gezinnen en verzorgers. Patiënten kunnen sociaal isolement en angst ervaren vanwege het doorleken van verbanden.<sup>17</sup>

Eclipse® heeft een ondoorlaatbare toplaag om lekken<sup>18</sup> te voorkomen. Hierdoor zijn er geen meerdere verbandlagen nodig. Het aanbrengen van meerdere verbandlagen wordt niet beschouwd als best practice of in het belang van de patiënt. Het kan het risico op maceratie, infectie, ongemak, lekkage en pijn verhogen.

Een audit van 100 patiënten waarbij vier super absorberende verbanden werden vergeleken, toonde significante verschillen in lekkage van de verbanden op dag 1, 3 en 7 waarbij Eclipse® niets doorlaat op elke dag (figuur 2).<sup>18</sup>

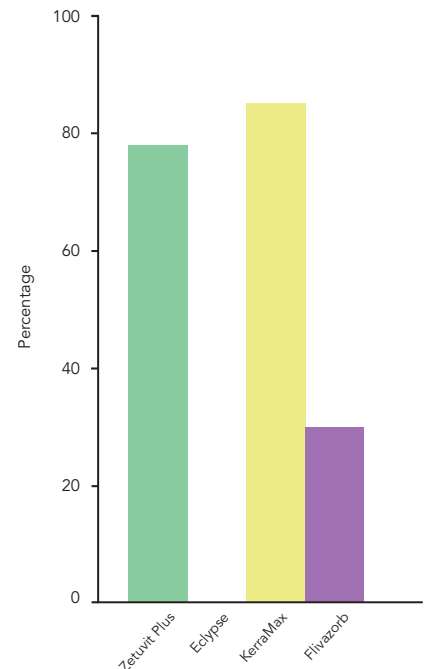

Figuur 2: Lekkage bij verbandwissel op dag 7

## Ongeëvenaard assortiment en unieke vormen

Eclipse® is het enige assortiment super absorberende verbanden dat standaard, zachte hechting biedt met Silfix®-technologie en border versies. Uniek gevormde verbanden zijn verkrijgbaar, zoals Eclipse® Foot, Eclipse® Boot en Eclipse® Contour.

Door het grootste assortiment kunt u erop vertrouwen dat er een Eclipse® is voor al uw patiënten.

**NIEUWE MATEN**  
De Eclipse-familie groeit mee  
Eclipse van 10x20cm en 20x20cm  
nu beschikbaar




# Samenstelling van eclypse® superabsorberende verbanden

Vier betrouwbare lagen voor het effectief verwerken van exsudaat:




## snel absorberende laag

De snelle afvoerende laag absorbeert exsudaat uit het wondbed. De afvoersnelheid is geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat de wond niet uitdroogt en dat maceratie aan de randen wordt vermeden. Exsudaat wordt in de CrystaLock-laag afgeleverd.

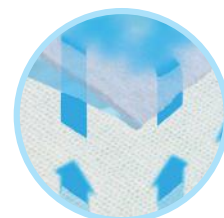


## CrystaLock-laag

De CrystaLock-laag absorbeert het wondvocht en sluit het op in het verband zodat lekkage wordt voorkomen. Infectie-veroorzakende bacteriën en Matrix Metallo Proteïnasen (MMP's), die wondgenezing kunnen vertragen, worden hierdoor ook opgesloten met het exsudaat.

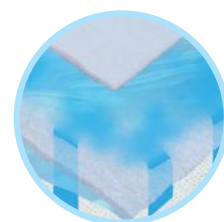


## Subtop laag

De subtop laag helpt het verband haar vorm te behouden, bevordert een gelijkmatige verdeling van het exsudaat in de CrystaLock-laag en voorkomt dat het verband gaat zakken.

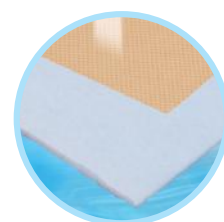

## Toplaag

De toplaag laat geen vocht door, waardoor de patiënt niet in verlegenheid kan worden gebracht door lekkage. De toplaag heeft een hoge dampdoorlaatbaarheid om de exsudaat verwerking te optimaliseren en is water-, bacterie- en virusbestendig.

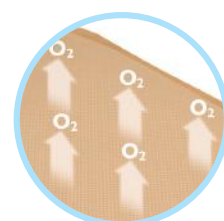



# Eclipse®

Super absorberende verbanden

assortiment

## Eclipse®



### Beschrijving

Eclipse® is een super absorberend verband met CrystaLock-technologie en ondoorlaatbare toplaag.

### Indicaties

Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden die compressie- of een absorberend verband vereisen.


### Gebruik

Verwijder uit de verpakking en plaats de witte kant naar beneden op het wondoppervlak. Voor grotere wonden, naast elkaar leggen en met tape vastzetten.

Gebruik een geschikte zwachtel of windsel om te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

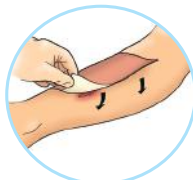

## Eclipse®

ADHERENT



### Beschrijving

Eclipse® Adherent is een super absorberend verband met CrystaLock-technologie, ondoorlaatbare toplaag en zachte siliconen contactlaag.

### Indicaties

Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden die baat hebben bij zachte kleefkracht en compressie of een absorberend verband vereisen.

### Gebruik


Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats met de witte, zacht klevende kant, naar beneden op het wond oppervlak.

Voor grotere wonden, naast elkaar leggen en met tape vastzetten.

Gebruik een geschikte zwachtel of windsel om te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

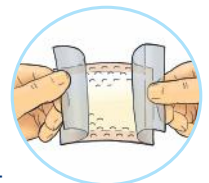

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
10x10cm	15351114	CR3818	20
15x15cm	15351122	CR3769	20
10x20cm	16675614	CR4460	10
20x20cm	16675622	CR4439	10
20x30cm	15351130	CR3743	20
60x40cm	15351149	CR3808	10

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
10x10cm	15351076	CR3881	10
10x20cm	15351084	CR3883	10
15x15cm	15351092	CR3863	10
20x30cm	15351106	CR3864	10

# Eclipse®

## ADHERENT SACRAL



### Beschrijving

Eclipse® Adherent Sacral is een super absorberend verband met CrystaLock technologie, ondoorlaatbare toplaag en zachte siliconen contactlaag. Het is speciaal gevormd om veilig in het sacrale gebied te gebruiken.

### Indicaties


Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden in het sacrale gebied.

### Gebruik

Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats een witte, klevende kant op het wond oppervlak.

Gebruik een geschikte tape of een secundair verband om het verband te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

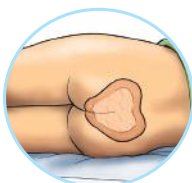

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
17x19cm	15538540	CR3985	10
22x23cm	15538559	CR3986	10

# Eclipse®

## BORDER



### Beschrijving

Eclipse® Border en Eclipse® Border Oval zijn super absorberende verbanden met CrystaLock technologie, ondoorlaatbare toplaag en zachte siliconen contactlaag en border.

### Indicaties


Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden.

### Gebruik

Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats een witte, klevende kant op het wond oppervlak.

Zorg voor een rand van 2 cm rond de wond en zorg dat de border volledig verkleefd is aan de huid.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

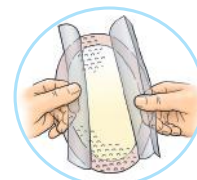

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

### Bestel informatie

	Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
	15x15cm	15960439	CR4296	10
	20x30cm	15960447	CR4297	10
OVAAL	10x20cm	15960455	CR4300	10
	15x20cm	15960463	CR4299	10
	20x30cm	15960471	CR4298	10

# Eclipse®

## CONTOUR



### Beschrijving

Eclipse® Contour is een super absorberend verband met CrystaLock-technologie en ondoorlaatbare toplaag. Het is uniek ontwikkeld om te vormen naar lichaamsomtrekken en zo een optimaal contact met de wond te garanderen.

### Indicaties

Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden in moeilijk te verbinden gebieden zoals de onderarm, de buik, het onderbeen en de dij.


### Gebruik

Verwijder uit de verpakking en plaats de witte kant naar beneden op het wondoppervlak.

Voor grotere wonden, naast elkaar leggen en met tape vastzetten.

Gebruik een geschikt windsel of tape om te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

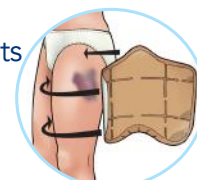

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
30x51cm	16171101	CR4398	10

# Eclipse®

## FOOT



### Beschrijving

Eclipse® Foot is een super absorberend verband met CrystaLock-technologie en ondoorlaatbare top laag. Het heeft een unieke vorm om veilig rond de voet te passen, welke vaak moeilijk te verbinden is met normaal gevormde verbanden.

### Indicaties

Geschikt voor matig tot hevig exsuderende wonden aan de voet.

### Gebruik

Verwijderen uit de verpakking, het verband volledig openen en met de witte kant naar boven op de vloer leggen.

Plaats de voet op het midden gedeelte van het verband met de hiel aan de achterkant. Er moeten flappen aan de voorkant en aan beide zijden van de voet zichtbaar zijn.

Vouw de voorflap over de voet en zet vast met tape. Vouw de zijflappen over de voet en zet ze deze ook vast met tape.

Gebruik een geschikt windsel of tape om het verband te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
33x48cm	15959740	CR4219	5

# Eclipse®

## BOOT



### Beschrijving

Eclipse® Boot is een super absorberend verband met CrystaLock-technologie en ondoorlaatbare top laag. Het heeft een unieke vorm om veilig rond het onderbeen te passen.

### Indicaties

Matig tot hevig exsuderende wonden op het onderbeen.

### Gebruik

Verwijderen uit de verpakking, volledig openen en met de witte kant naar boven op de vloer leggen.


Plaats de hiel van de voet aan de basis van de driehoek gevormd door de rasterlijnen. De driehoek moet naar de patiënt wijzen.

Vouw de kleine voorste flappen over de voet en zet vast met tape. Vouw de grote achterste flappen rond het been en zet vast met tape.

Gebruik een geschikt windsel of tape om het verband te fixeren.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van de hoeveelheid exsudaat.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

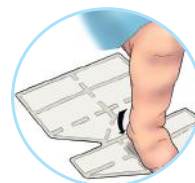

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
55x47cm	16068238	CR4237	5
60x70cm	15538567	CR4014	5
71x80cm	16222369	CR4229	5

# Advazorb

## Absorberende schuimverbanden

Advazorb® is een veelzijdig assortiment van klinisch bewezen, patiëntvriendelijke, absorberende schuimverbanden die speciaal zijn ontworpen voor een breed scala aan wondgenezings-aspecten.

Hoge mate van comfort, beoordeeld door zorgprofessionals

Het Advazorb®-assortiment maakt gebruik van zacht, vormbaar schuim, waardoor het verband comfortabel te dragen is. De toplaag is glad, waardoor kleding en beddengoed het verband door frictie niet kunnen verschuiven. Advazorb® Border heeft een brede, voorgevormde rand om het verband comfortabel en veilig op zijn plaats te houden.




**Meer dan 77% van de artsen beoordeelde het comfort in gebruik als 4+ op een schaal van 1-5<sup>21</sup>**

Elke patiënt is anders, dus elk product in het assortiment heeft verschillende functies om aan verschillende behoeften te voldoen; Lite-varianten voor weinig exudaat, Silfix®-technologie voor pijnloze verbandwissel en de mogelijkheid om de positie van het verband aan te passen, een brede, voorgevormde rand die veiligheid en een langere draagtijd biedt en speciaal gevormde verbanden voor probleemgebieden.

# Optimale vochtbalans voor wondgenezing

Het uitstekende vermogen om vloeistof te verwerken, biedt Advazorb® het vochtige wondmilieu dat ideaal is voor wondgenezing. Goede vloeistofretentie maakt dat Advazorb® ook effectief is onder compressie.

Verkrijgbaar in 'lite'-varianten, met een dunner schuim, voor weinig exsudaat.

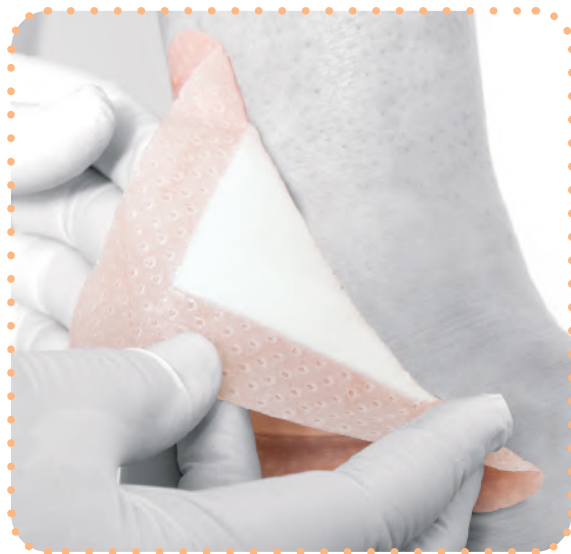

## Topkwaliteit verbanden geprijsd voor het zorgbudget van vandaag

De financiële lasten van wondzorg zijn algemeen bekend en er is een toenemende druk op wondzorg professionals om meer met minder te doen. Premium producten die effectief en goed verdraagbaar zijn voor de patiënt, zijn nodig om goede resultaten te behalen.

Advazorb® combineert deze twee, soms tegenstrijdige, doelstellingen.



Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk volgens hoge kwaliteitsnormen, met een hoog niveau aan evidence.



Kostenbewust geprijsd, met de huidige budgetten voor wondzorg in het achterhoofd.



# Advazorb

Absorberende schuimverbanden

assortiment

## Advazorb Advazorb



### Beschrijving

Advazorb® is een niet-verklevend, absorberend schuimverband met ademende toplaag. Verkrijgbaar in normale en 'Lite' varianten.

### Indicaties

Weinig tot matig exsuderende wonden.

### Gebruik



Verwijder uit de verpakking en breng rechtstreeks aan op het wondoppervlak, met de roze kant naar boven.

Zorg ervoor dat het schuim de wondrand 2 cm overlapt.

Fixeren met tape, secundair verband of passend windsel.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

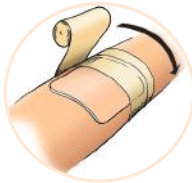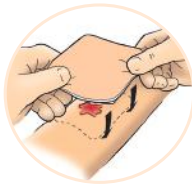

### Bestel informatie

	Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
	5x5cm	16520262	CR4221	10
	7.5x7.5cm	15709825	CR4165	10
	10x10cm	15709833	CR4166	10
	12.5x12.5cm	15709868	CR4167	10
	15x15cm	15709876	CR4168	10
	10x20cm	15709841	CR4169	10
	20x20cm	15709884	CR4170	10
LITE	7.5x7.5cm	15710068	CR4171	10
	10x10cm	15710076	CR4172	10
	12.5x12.5cm	15710092	CR4173	10
	15x15cm	15710106	CR4174	10
	10x20cm	15710084	CR4175	10
	20x20cm	15710114	CR4176	10



SILFIX



### Beschrijving

Advazorb® Silfix is een absorberend schuimverband met ademende toplaag en zachte siliconen wond contactlaag. Verkrijgbaar in normale en 'Lite' varianten.

### Indicaties

Weinig tot matig exsuderende wonden die compressie of absorberende verbanden vereisen.

### Gebruik


Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats met de zachte siliconen wond contactlaag op het wondoppervlak.

Zorg ervoor dat het schuim de wondrand 2 cm overlapt.

Fixeren met tape, secundair verband of passend windsel.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

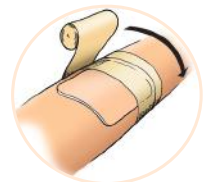

### Bestel informatie

	Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
	7.5x7.5cm	15709892	CR4177	10
	10x10cm	15709906	CR4178	10
	12.5x12.5cm	15709914	CR4179	10
	15x15cm	15709922	CR4180	10
	10x20cm	15709930	CR4181	10
	20x20cm	15709949	CR4182	10
LITE	7.5x7.5cm	15710122	CR4185	10
	10x10cm	15710130	CR4186	10
	12.5x12.5cm	15710149	CR4187	10
	15x15cm	15710157	CR4188	10
	10x20cm	15710165	CR4189	10
	20x20cm	15710173	CR4204	10



# Advazorb



## BORDER



### Beschrijving

Advazorb® Border is een absorberend schuimverband met ademende toplaag, zachte siliconen wond contactlaag en border. Verkrijgbaar in normale en 'Lite' varianten.

### Indicaties

Weinig tot matig exsuderende wonden die geschikt zijn voor een borderverband.

### Gebruik

Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats met de zachte siliconen wond contactlaag op het wondoppervlak. Zorg ervoor dat het schuim de wondrand bedekt met een minimale overlapping van 2 cm. Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie. Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



### Bestel informatie

	Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
	7.5x7.5cm	15709957	CR4190	10
	10x10cm	15709965	CR4191	10
	12.5x12.5cm	15709973	CR4192	10
	15x15cm	15709981	CR4193	10
	10x20cm	15710009	CR4194	10
	20x20cm	15710017	CR4195	10
	10x30cm	15710025	CR4196	10
	7.5x7.5cm	15710181	CR4197	10
	10x10cm	15710203	CR4198	10
	12.5x12.5cm	15710211	CR4199	10
LITE	15x15cm	15710246	CR4200	10
	10x20cm	15710238	CR4201	10
	20x20cm	15710254	CR4202	10
	10x30cm	15710262	CR4203	10



## SACRAL



### Beschrijving

Advazorb® Sacral is een absorberend schuimverband met ademende toplaag, zachte siliconen wond contactlaag en border. Het is speciaal gemaakt om in het sacrale gebied toe te passen.

### Indicaties

Weinig tot matig exsuderende wonden in het sacrale gebied.

### Gebruik

Verwijder uit de verpakking, verwijder de filmlaag en plaats met de zachte siliconen wond contactlaag op het wondoppervlak. Zorg ervoor dat het schuim de wondrand bedekt met een minimale overlapping van 2 cm. Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
17x19cm	16222407	CR4401	10
22x23cm	16222415	CR4402	10

# Advazorb



## HEEL

### Beschrijving

Advazorb® Heel is een niet-verklevend absorberend schuimverband met ademende toplaag welke speciaal is ontworpen om rond de hiel of elleboog toe te passen.

### Indicaties

Weinig tot matig exsuderende wonden op de hiel

of elleboog.

### Gebruik

Verwijderen uit de verpakking en rechtstreeks op het wondoppervlak aanbrengen, met de roze kant naar boven. Fixeer met tape, secundair verband of passend windsel. Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

### Bestel informatie


Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
17x21cm	15841715	CR4228	5



## Pijnvrije verbandwissels om de kwaliteit van leven te verbeteren

Pijn tijdens verbandwissels kan een nadelig effect hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt (QoL). Silflex® is een origineel verband met Silfix®-technologie, dat verbandwissels mogelijk maakt zonder overmatig letsel aan het wondbed of de omliggende huid te veroorzaken.<sup>22</sup>

In een recent onderzoek onder 20 patiënten scoorde Silflex® beter dan een alternatieve siliconen contactlaag op gemiddelde pijnscores bij applicatie, in situ en verwijdering (zie figuur 3).<sup>23</sup>

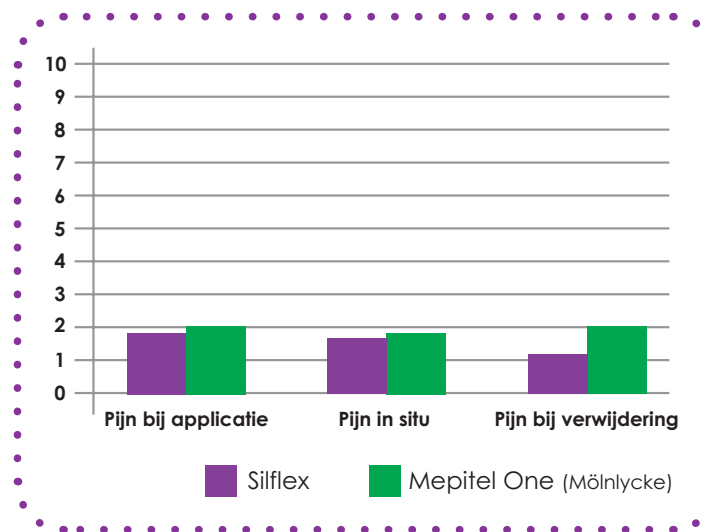

Figuur 3: Gemiddelde pijnscores

Het gebruik van silflex® kan pijn verminderen, wat de kwaliteit van leven verbetert, angst vermindert en het genezingsproces kan bevorderen<sup>24</sup>

# Gemakkelijkere exsudaat verwerking met unieke grotere gaten

Exsudaat verwerking is een belangrijke uitdaging voor iedereen binnen wondzorg. Het is algemeen bekend dat effectieve exsudaat verwerking de genezingstijd verkort, het materiaal verbruik optimaliseert en de impact op het fysieke- en mentale welzijn van de patiënt vermindert.<sup>15</sup>

Als het exsudaat echter niet door de contactlaag in een geschikt secundair verband opgenomen kan worden, kan het met de huid in contact blijven, wat maceratie en verdere achteruitgang van de wond veroorzaakt.

Silflex® heeft unieke, 2 mm brede, gaten om het exsudaat door te laten in het secundaire verband, waardoor het risico van maceratie wordt vermindert.


## Superieure hanteerbaarheid zonder vouwen en verkleven

Silflex® is speciaal iets dikker gemaakt dan sommige andere contactlagen, wat betere hanteerbaarheid biedt omdat het niet kan vouwen.

Dit vermindert verspilling die wordt veroorzaakt doordat het verband verkleeft.

Ondanks het feit dat Silflex® dikker is, blijft het toch heel goed vormbaar<sup>23</sup>, wat het comfort en de therapietrouw van de patiënt ten goede komt.

In één onderzoek gaven verpleegkundigen Silflex® een 8 of hoger als beoordeling, waarbij 0 slecht was en 10 uitstekend, op alle geteste prestatie indicatoren (zie figuur 4).<sup>23</sup>

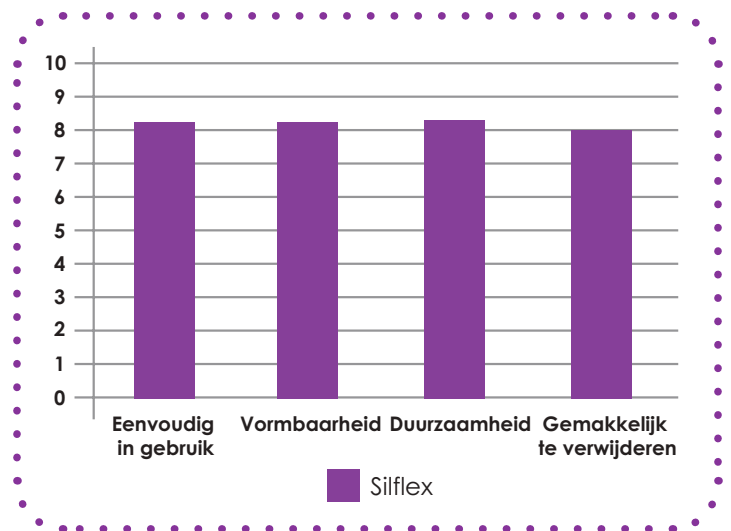

figuur 4: gemiddelde scores Silflex prestaties

# Silflex®

Zachte siliconen contactlaag

assortiment



## Silflex



### Beschrijving

Silflex® is een atraumatische wond contactlaag, gemaakt van polyester gaas bekleed met Silfix® zachte siliconen.

### Indicaties

Acute en chronische wonden die bescherming vereisen.

### Gebruik


Verwijder de doorzichtige filmlaag aan beide zijden en breng het verband rechtstreeks op de wond aan.

Kan de wond overlappen of kan op maat geknipt worden met een scherpe schaar.

Afdekken met een geschikt secundair verband of windsel.

Kan maximaal 14 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.

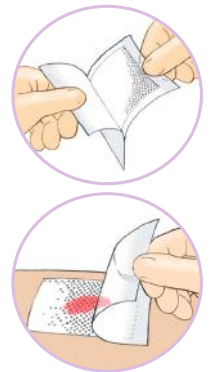

### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
5x7cm	15350657	CR3922	10
8x10cm	15350665	CR3923	10
12x15cm	15350681	CR3924	10
20x30cm	15350703	CR3925	10
35x60cm	-	CR4006	5



## Siltape



### Beschrijving

Siltape® is een rol zachte siliconen fixatietape (niet-steriel) met gemakkelijke scheurperforaties, geen schaar vereist.

### Indicaties

Gebruik in plaats van gewone tape, vooral op brokkelige of gevoelige huid. Ideaal voor pediatrie en pasgeborenen.

### Gebruik

Rol af tot de gewenste lengte.

Verwijder de transparante filmlaag en plaats de siliconenzijde naar beneden.



### Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
2cm x 3m	15411982	CR3938	1
4cm x 1.5m	15411990	CR3939	1



# Vellafilm



## Beschrijving

Vellafilm® is een semi-permeabel polyurethaan folie met Silflex® zachte siliconen kleeflaag. Doorzichtig zodat de wond of het primaire verband kan worden waargenomen door de Vellafilm®, waardoor de verbandwisselfrequentie wordt geminimaliseerd.

## Indicaties

Gebruik op chirurgische wonden, oppervlakkige epithelialiserende wonden en voor het fixeren van primaire verbanden.

## Gebruik

Verwijder de transparante filmlaag en breng direct aan op de wond of op het primaire verband. Zorg voor een overlapping van 2 cm rond de wondrand.

Kan maximaal 7 dagen in situ blijven, afhankelijk van klinische observatie.

Zie de gebruiksaanwijzing voor de volledige instructie.



## Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
12x12cm	15350614	CR3919	10
15x20cm	15350649	CR3921	10
12x35cm	15350630	CR3917	10

# Advasil Conform



Advasil® Conform is een siliconengelsheet voor het behandelen van littekenweefsel.

Er zijn aanwijzingen dat siliconengelsheets het oppervlak van verhoogde of verkleurde littekens kan verbeteren. Het kan de ontwikkeling van keloïd littekenweefsel helpen voorkomen.

Advasil® Conform medicinale zelfklevende siliconengel met Silfix®-technologie die zacht aan de huid hecht om littekenweefsel en recent geheelde wonden te helpen behandelen.

## Kenmerken

- ✓ Kan worden gevormd om het littekengebied optimaal te bedekken
- ✓ Herbruikbaar tot 28 dagen
- ✓ Zelfklevend met zachte verwijdering
- ✓ Vormbaar
- ✓ Wasbaar



## Indicaties

Hypertrofische en keloïde littekens.

## Gebruik

Verwijder uit de verpakking en verwijder de filmlaag. Plaats de gelzijde op het litteken.

Kan op maat geknipt worden voor kleinere littekens. Voor grotere littekens, plaats meerdere vellen naast elkaar. Was minstens één keer per dag met warm water en milde zeep. Vermijd het gebruik van sterke zeep of oplosmiddelen, die ontbinden van de siliconen en/of huidirritatie kunnen veroorzaken.

Zorg ervoor dat het product droog is voordat u het opnieuw aanbrengt of opbergt door het met een pluisvrije doek droog te deppen. Plaats de filmlaag terug bij het opbergen en bewaar in de originele verpakking.

Bouw de draagtijd op over een tijdsperiode om de huid te laten wennen, totdat Advasil® Conform 24 uur comfortabel gedragen kan worden.

Het is belangrijk dat de huid onder het verband schoon en droog wordt gehouden; was het huidoppervlak dagelijks.



## Bestel informatie

Afmeting	Z-Index nummer	Artikel nummer	Verpakking
10x10cm	-	CR3845	5
10x15cm	-	CR3832	5



# Bestel informatie

## Activon® Manuka honing

Artikel	Z-Index nummer	Artikel nummer	Afmeting	Verpakking
<b>Actilite®</b>	16222199	CR4281	5cm x 5cm	10
Niet verklevend	15352161	CR3849	10cm x 10cm	10
viscose netver-	15352188	CR3852	10cm x 20cm	10
band gecoat met	16222202	CR4366	20cm x 30cm	10
100% Manuka	16222237	CR4367	30cm x 30cm	5
honing en 1%	16222334	CR4368	30cm x 60cm	5
Manuka olie				
<b>Activon® Tube</b>				
100% Medicinale	15350983	CR3830	25g	12
Manuka honing				
<b>Activon® Tulle</b>				
Geweven viscose	15351009	CR3761	5cm x 5cm	5
gaas geïmpreg-	15351017	CR3658	10cm x 10cm	5
neerd met 100%				
Manuka honing				
<b>Algivon®</b>				
Alginaat verband	15351041	CR3831	5cm x 5cm	5
geïmpregneerd	15351068	CR3659	10cm x 10cm	5
met 100% Manuka				
honing				
<b>Algivon® Plus</b>				
Versterkt alginaat	15959716	CR4230	5cm x 5cm	5
verband geïm-	15959724	CR4225	10cm x 10cm	5
pregneerd met				
100% Manuka				
honing				
<b>Algivon® Plus Ribbon</b>				
Versterkte				
alginaat streng	15959732	CR4231	2.5cm x 20cm	5
geïmpregneerd				
met 100% Manuka				
honing				

## Eclipse® Super absorberende verbanden

Artikel	Z-Index nummer	Artikel nummer	Afmeting	Verpakking
<b>Eclipse®</b>	15351114	CR3818	10cm x 10cm	20
Super absorberend	15351122	CR3769	15cm x 15cm	20
verband	15351130	CR3743	20cm x 30cm	20
	15351149	CR3808	60cm x 40cm	10
<b>Eclipse® Adherent</b>				
Super absorberend	15351076	CR3881	10cm x 10cm	10
verband met	15351084	CR3883	10cm x 20cm	10
siliconen kleeflaag	15351092	CR3863	15cm x 15cm	10
	15351106	CR3864	20cm x 30cm	10
<b>Eclipse® Adherent Sacral</b>				
Super absorberend	15538540	CR3985	17cm x 19cm	10
sacraal verband	15538559	CR3986	22cm x 23cm	10
met siliconen				
kleeflaag				
<b>Eclipse® Border</b>				
Super absorberend	15960439	CR4296	15cm x 15cm	10
border verband	15960447	CR4297	20cm x 30cm	10
met siliconen				
kleeflaag				
<b>Eclipse® Border Oval</b>				
Super absorberend	15960455	CR4300	10cm x 20cm	10
border verband	15960463	CR4299	15cm x 20cm	10
met siliconen	15960471	CR4298	20cm x 30cm	10
kleeflaag				
<b>Eclipse® Boot</b>				
Super absorberend	16068238	CR4237	55cm x 47cm	5
onderbeen verband	15538567	CR4014	60cm x 70cm	5
	16222369	CR4229	70cm x 80cm	5
<b>Eclipse® Foot</b>				
Super absorberend	15959740	CR4219	33cm x 48cm	5
voet verband				
<b>Eclipse® Contour</b>				
Super absorberend	16171101	CR4398	30cm x 51cm	10
variabel plaatsbaar				
verband				




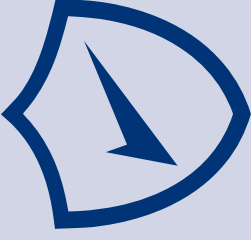
## Advazorb® Absorberende schuimverbanden

Artikel	Z-Index nummer	Artikel nummer	Afmeting	Verpakking
<b>Advazorb®</b>	16520262	CR4221	5cm x 5cm	10
Absorberend	15709825	CR4165	7.5cm x 7.5cm	10
schuimverband	15709833	CR4166	10cm x 10cm	10
met toplaag	15709868	CR4167	12.5cm x 12.5cm	10
	15709876	CR4168	15cm x 15cm	10
	15709841	CR4169	10cm x 20cm	10
	15709884	CR4170	20cm x 20cm	10
<b>Advazorb® Lite</b>				
Absorberend	15710068	CR4171	7.5cm x 7.5cm	10
schuimverband	15710076	CR4172	10cm x 10cm	10
met toplaag	15710092	CR4173	12.5cm x 12.5cm	10
	15710106	CR4174	15cm x 15cm	10
	15710084	CR4175	10cm x 20cm	10
	15710114	CR4176	20cm x 20cm	10
<b>Advazorb® Silfix</b>				
Absorberend	15709892	CR4177	7.5cm x 7.5cm	10
schuimverband	15709906	CR4178	10cm x 10cm	10
met zacht	15709914	CR4179	12.5cm x 12.5cm	10
siliconen kleeflaag	15709922	CR4180	15cm x 15cm	10
	15709930	CR4181	10cm x 20cm	10
	15709949	CR4182	20cm x 20cm	10
<b>Advazorb® Silfix Lite</b>				
Absorberend	15710122	CR4185	7.5cm x 7.5cm	10
schuimverband	15710130	CR4186	10cm x 10cm	10
met zacht	15710149	CR4187	12.5cm x 12.5cm	10
siliconen kleeflaag	15710157	CR4188	15cm x 15cm	10
	15710165	CR4189	10cm x 20cm	10
	15710173	CR4204	20cm x 20cm	10
<b>Advazorb® Border</b>				
Absorberend	15709957	CR4190	7.5cm x 7.5cm	10
border schuimver-	15709965	CR4191	10cm x 10cm	10
band met zacht	15709973	CR4192	12.5cm x 12.5cm	10
siliconen kleeflaag	15709981	CR4193	15cm x 15cm	10
	15710009	CR4194	10cm x 20cm	10
	15710017	CR4195	20cm x 20cm	10
	15710025	CR4196	10cm x 30cm	10
<b>Advazorb® Border Lite</b>				
Absorberend	15710181	CR4197	7.5cm x 7.5cm	10
border schuimver-	15710203	CR4198	10cm x 10cm	10
band met zacht	15710211	CR4199	12.5cm x 12.5cm	10
siliconen kleeflaag	15710246	CR4200	15cm x 15cm	10
	15710238	CR4201	10cm x 20cm	10
	15710254	CR4202	20cm x 20cm	10
	15710262	CR4203	10cm x 30cm	10
<b>Advazorb® Heel</b>				
Absorberend	15841715	CR4228	17cm x 21cm	5
schuimverband				
met toplaag				
<b>Advazorb® Sacral</b>				
Absorberend	16222407	CR4401	17cm x 19cm	10
border schuimver-	16222415	CR4402	22cm x 23cm	10
band met zacht				
siliconen kleeflaag				
<b>Silflex® Silflex zachte siliconen contactlaag</b>				
<b>Silflex®</b>				
Siliconen wond	15350657	CR3922	5cm x 7cm	10
contactlaag	15350665	CR3923	8cm x 10cm	10
	15350681	CR3924	12cm x 15cm	10
	15350703	CR3925	20cm x 30cm	10
	-	CR4006	35cm x 60cm	5
<b>Vellafilm®</b>				
Semi-permeabel	15350614	CR3919	12cm x 12cm	10
folie met siliconen	15350649	CR3921	15cm x 20cm	10
kleeflaag	15350630	CR3917	12cm x 35cm	10
<b>Siltape®</b>				
Siliconen tape,	15411982	CR3938	2cm x 3m	1
geperforeerd	15411990	CR3939	4cm x 1.5m	1
op rol				
<b>Advasil® Conform</b>				
Siliconen gelsheet	-	CR3845	10cm x 10cm	5
	-	CR3832	10cm x 15cm	5



# Optimalisatie van wondgenezing met Advancis Medical

Wij geloven dat de sleutel tot optimale wondgenezing het gebruik van de juiste producten is.

Wondbed preparatie		Wondgenezing		
	Necrose	Wondbeslag	Granulatie	Epithelialisatie
Doel	 Verwijder necrotisch weefsel	 Beslag verwijderen Exsudaat verwijderen	 Exsudaat verwerken Beschermen	 Beschermen
Product	Activon® Manuka honing	Activon® Manuka honing	Eclypse® Advazorb® Silflex®	Advazorb® Silflex®

## Referenties

1. O'Keeffe M (2006). Evaluation of a community-based wound care programme in an urban area. Poster presented at EWMA Conference, 2006
2. Dowsett C, Bielby A, Searle, R. (2014) Reconciling increasing wound care demands with available resources. *Journal of wound care* Vol 2 3, No11,
3. <http://www.nursingtimes.net/nursing-practice/specialisms/management/mandatory-training-and-cpd-victims-of-short-staffing-warns-rcn/5084573.article>
4. Dunford C, Cooper R, Molan P, White R. (2000) The use of honey in wound management. *Nursing Standard*, 15, 11, 63-68
5. Cooper R, Jenkins L, Rowlands R (2011) Inhibition of biofilms through the use of Manuka honey. *Wounds UK* 7(1): 24-32
6. Perry P, O'Hara S. Do honey dressings reduce the need for antibiotics? Poster presentation
7. Marvic E, Wittmann S, Barth G, Henle T (2008) Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (*Leptospermum scoparium*) honeys from New Zealand. *Mol Nutr Food Res* 52: 483-89
8. Kwakman PHS, te Velde AA, de Boer L, Vandenbrouke-Grauls CMJE, Zaat SAJ (2011) Two major medicinal honeys have different mechanisms of bactericidal activity. *PLoS ONE* 6(3): e17709
9. Cooper R (2006) The antibacterial activity of honey. In: White R, Cooper R, Molan P (2006) *Honey: A Modern Wounds Management Product*. Wounds UK, Aberdeen: 24-32
10. Molan PC (1992) The antibacterial activity of honey. 1. The nature of the antibacterial activity. *Bee World*; 73(1): 5-28.
11. Gethin G, Cowman S, (2005) Case series of use of Manuka honey in leg ulceration. *Int Wound J*. 2(1):10-15
12. Barcic M, Heasley D. Evaluation of a 100% Manuka honey (free of color additives and preservatives) in the debridement of diabetic foot ulcers versus a pharmaceutical chemical debrider and two other Manuka honey based products. Poster presentation
13. Heasley D. Evaluation of Expedience in the Debridement of Diabetic Ulcers with Fibrin Utilizing a Preservative and Coloration Free 100% Manuka Honey versus a Pharmaceutical Chemical Debrider, an 80% Manuka Honey with preservatives and Coloration and a 100% Manuka Honey with Color Additives. Poster presentation
14. Cooper R. (2016) Honey for wound care in the 21st century, *Journal of Wound Care*. Vol 25, No 9
15. World Union of Wound Healing Societies (2007) *Wound Exudate and the Role of Dressings: A Consensus Document. Principles of best practice*. [http://www.woundsinternational.com/pdf/content\\_42.pdf](http://www.woundsinternational.com/pdf/content_42.pdf) (accessed 05.04.2018)
16. Data on File: TR-333
17. Faucher N, Safar H, Baret M, Phillippe A, Farid R. (2012) Superabsorbent dressing for copiously exuding wounds. *Br J Nurs (Tissue Viability Supplement)*, 21, 12, S22-28.
18. Data on File: TR-207
19. Browning P, White R, Rowell T. (2016) Comparative evaluation of the functional properties of superabsorbent dressings and their effect on exudate management. *Journal of Wound Care* Vol 25, No 8
20. Rafter L, Anthony D, Collier M, Rafter M. (2015). Stopping the Strikethrough: an audit of patient outcomes on four superabsorbent dressings. *Wounds UK* Vol 11 No 3
21. Evaluation of Advancis Medical Products Survey, March 2018
22. Timmons J, Gray D, Russell F (2009) *Silflex® soft silicone wound contact dressing*. *Wounds UK* 5(2)
23. Edwards J, Mason S A. Developing a structured process for evaluating burn dressings. Poster presentation
24. Holden-Lund C (1987) Effects of relaxation with guided imagery on surgical stress and wound healing. *Res Health Nurse* 11(4): 235-44

Tel: +31 (0)38 808 0107 | Email: [info@advancismedical.nl](mailto:info@advancismedical.nl)

Advancis Medical Nederland b.v.  
Zuideinde 50  
7941 GJ Meppel

MAR575